

# Manual **MLA-02**

Residencias y Hospitales

<b>MANUAL MLA-02</b> .....	<b>1</b>
DESCRIPCIÓN .....	1
DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ .....	1
CARACTERÍSTICAS .....	1
INSTALACIÓN .....	2
<i>MONTAJE EN PARED</i> .....	2
<i>MONTAJE EN MESA</i> .....	3
PARÁMETROS TÉCNICOS .....	4
FALLOS COMUNES .....	5
UBICACIÓN CORRECTA DEL DISPOSITIVO .....	6
<i>INSTALACIÓN EN PARED</i> .....	6

## MANUAL MLA-02

### DESCRIPCIÓN

El dispositivo táctil indica una llamada de varias formas: el lateral se ilumina con un color específico, emite un sonido característico y resalta en la pantalla el lugar donde se originó la llamada, mostrando también un registro cronológico de llamadas anteriores en la parte superior de la pantalla.

### DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ



1. Luz lateral
2. Altavoz
3. Botón de inicio
4. Botón de encendido y apagado

### CARACTERÍSTICAS

Pantalla táctil capacitiva	10.1 pulgadas
Luz de lámpara	Indicador del estado del Led
Alimentación	8Ω 2W

Tecla de encendido	Pulsa la tecla de encendido durante más de 2 segundos para encender/apagar
Tecla Inicio	Haga clic para volver a la página de inicio
Ranura para tarjeta TF	Tarjeta TF de inserción externa
Reservado	Micro USB


## INSTALACIÓN

### MONTAJE EN PARED

1. Posicione el soporte en la pared y marque los puntos donde se colocarán los tornillos para fijarlo.



2. Coloque los alzadores en los cuatro agujeros de la pantalla e Inserte los cuatro tornillos en los alzadores, asegurando una parte del soporte a la pantalla.

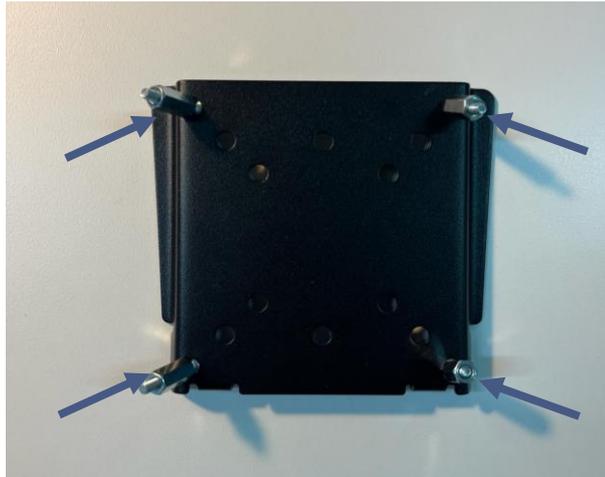

3. Instale el soporte con los alzadores en el dispositivo




4. Instale la otra parte del soporte en la pared, alineándola con los puntos marcados anteriormente.
5. Fije la pantalla en la pared y atornille por debajo para asegurarla firmemente en su lugar.
6. Presione el botón de encendido durante 3 segundos hasta que se ilumine la pantalla.

## MONTAJE EN MESA

1. Introduzca cada soporte en los agujeros correspondientes de la pantalla y deslice hacia abajo para anclarlo.



2. Coloque los plásticos antideslizantes en las patas del soporte.

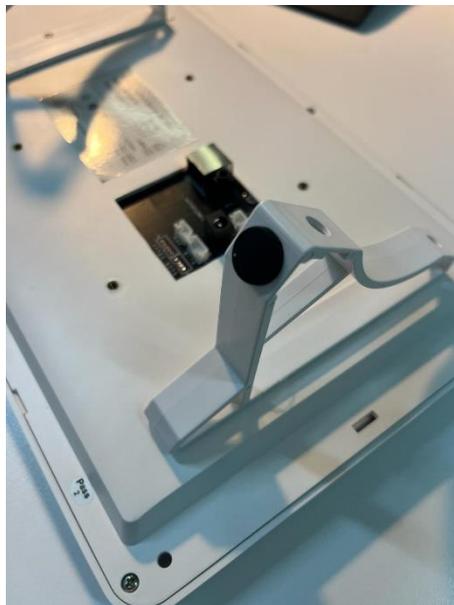

3. Presione el botón de encendido durante 3 segundos hasta que se ilumine la pantalla.

## PARÁMETROS TÉCNICOS

Tensión de puesta a tierra	DCI2VIA LORA
Corriente de reposo	<400mA
Corriente de trabajo	<600mA

Pantalla de visualización	10'
Resolución	1280*800
Temperatura de trabajo	- 10 'C 50 'C
Modo de instalación	Desktop type
Tamaño de la máquina	210*140x20mm


## FALLOS COMUNES

Fallos	Solución
Sin reacción a la electricidad	<p>Compruebe si la fuente de alimentación externa DC12V tiene salida.</p> <p>Pulse la tecla de encendido durante un tiempo prolongado para ver si puede encenderse.</p>
Visualización directa en la esquina superior derecha	<p>Entrar en "gateway setting "para comprobar si la</p> <p>clave de alimentación desconectada o si internet está bien</p>
Pantalla a veces pop-up pidiendo vinculante para llamar a las ventanas del dispositivo	<p>Entre en "Ajuste de llamada" y apague el parpadeo del nuevo dispositivo de llamada.</p>
El ordenador central de gestión no puede escanear el gateway	<p>Si está en la misma LAN, y el router está en DHCP</p> <p>Si la línea de red es normal</p> <p>Reiniciar la pasarela y volver a escanear</p>
La unidad central de gestión puede recibir la información VIII, pero el	<p>Si el dispositivo receptor está conectado a la unidad central de gestión o no.</p>

dispositivo receptor Itim1aI no puede recibir la información de llamada.	Si la pasarela y la región están configuradas para reenviar la información de llamada al actual dispositivo receptor.
--	---

## UBICACIÓN CORRECTA DEL DISPOSITIVO

### INSTALACIÓN EN PARED

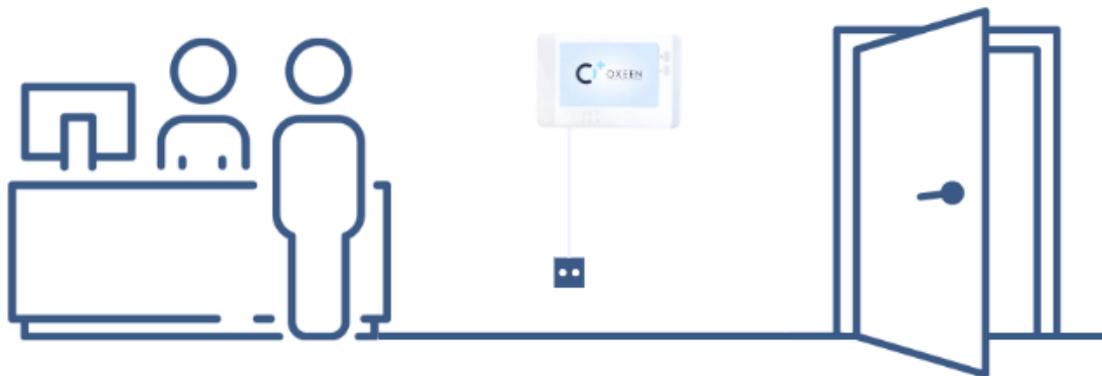

\* El dispositivo debe ubicarse a una altura de 1,5 metros sobre el suelo. Busca una zona cercana a un enchufe para conectar el dispositivo. Además, se recomienda conectarlo directamente a alguna toma del falso techo si es posible.