

# Manual **MPU-SERIES**

Residencias y Hospitales

<b>MANUAL MPU-SERIES .....</b>	<b>1</b>
DESCRIPCIÓN .....	1
INSTALACIÓN .....	1
<i>MONTAJE EN PARED .....</i>	<i>1</i>
MANTENIMIENTO.....	2
<i>CAMBIO DE BATERÍA .....</i>	<i>2</i>
PARÁMETROS TÉCNICOS .....	3
UBICACIÓN CORRECTA DE LOS DISPOSITIVOS.....	3
<i>INSTALACIÓN PULSADOR TIPO PERA .....</i>	<i>3</i>
<i>INSTALACIÓN PULSADOR DE BAÑO .....</i>	<i>4</i>

## MANUAL MPU-SERIES


### DESCRIPCIÓN

Hay diferentes tipos de pulsadores disponibles: el pulsador de pera para las habitaciones, el pulsador de baño, un pulsador sencillo y un pulsador portátil. Los usuarios pueden activar la señal de aviso tanto presionando la parte roja como el botón de pera, o tirando de la cuerda en el caso del pulsador de baño. Para cancelar la señal de aviso, el auxiliar debe presionar el botón verde de cancelar.


### INSTALACIÓN

#### MONTAJE EN PARED

1. Para retirar la tapa roja, usa una herramienta para hacer palanca en los laterales.

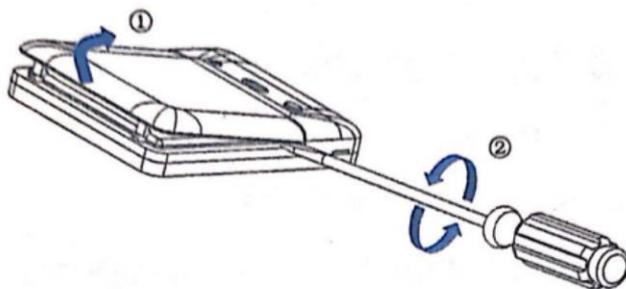

2. Fije el botón de llamada en la pared con tornillos o pegatinas como en la imagen.

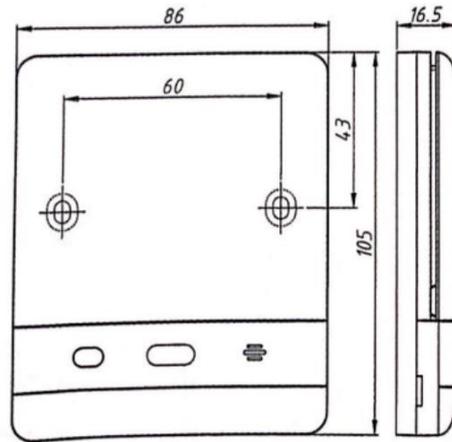


3. Después de colocar el pulsador en su lugar, presiona la tapa nuevamente para asegurarla en su posición.


## MANTENIMIENTO

### CAMBIO DE BATERÍA

1. Utiliza una herramienta para hacer palanca por debajo y retirar la tapa blanca inferior.

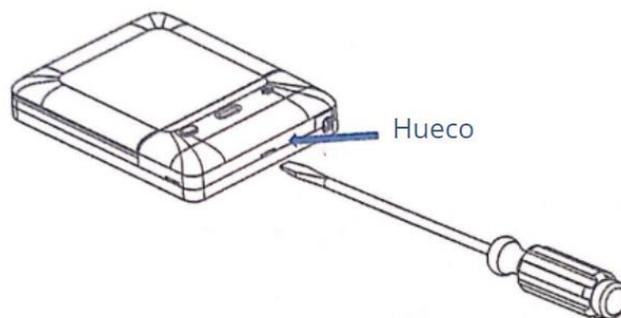

2. A continuación, utilice el destornillador de punta plana para hacer palanca en otras partes de la carcasa superior desde el borde de la brecha.

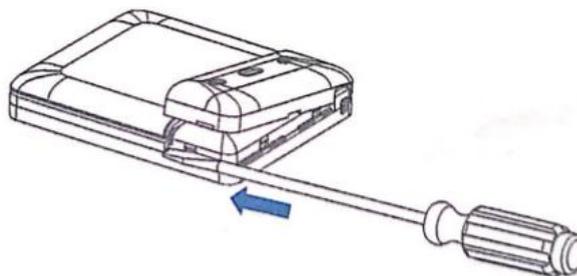

3. Extrae el plástico verde del interior.
4. Cambia la pila por una nueva.
5. Vuelve a colocar el plástico y la tapa haciendo presión para asegurarlos en su lugar.

## PARÁMETROS TÉCNICOS

- IP65
- Modo inalámbrico: LoRa
- Dos teclas: Llamar, Cancelar
- Color: Rojo
- Batería: 23A/12V
- Distancia de trabajo: 500m
- Dimensiones: 86(W) x 106(H) x 21(D) mm

## UBICACIÓN CORRECTA DE LOS DISPOSITIVOS


### INSTALACIÓN PULSADOR TIPO PERA

- Habitación individual



\* Coloca el dispositivo idealmente junto a la cama, cerca de la mesita de noche. Asegúrate de dejarlo lo bastante cerca de la cama para que el cable pueda alcanzar ambos lados cómodamente.

- Habitación doble

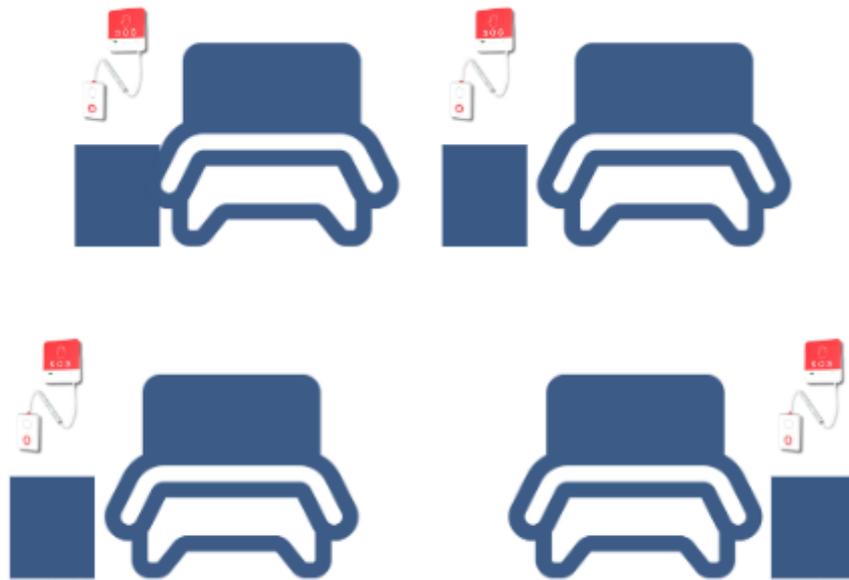

\* Coloca el dispositivo idealmente junto a la cama, cerca de la mesita de noche. Es importante no colocar un solo dispositivo entre dos camas.

## INSTALACIÓN PULSADOR DE BAÑO



\* Ajusta el pulsador del baño a una altura cómoda para poder presionar el botón SOS fácilmente, idealmente a unos 1,5 metros del suelo, asegurándote de que la

cuerda llegue hasta el suelo. Coloca el pulsador cerca del inodoro, a la altura de las rodillas aproximadamente cuando estés sentado.